

貳、檢體種類和容器:本實驗室不執行採檢工作，採檢動作由臨床病理科依本院 ISO 文件「病人辨識作業程序」(P18300-01-004)、「原始檢體收集手冊」(P13020-16-002)代執行之。

一、容器顏色分類：

不同顏色的試管中含不同的抗凝劑，不正確的試管，會影響檢驗的結果。

1. 橘頭：真空，含有協助分離血清的凝膠。
2. 綠色：真空，含有 Heparin
3. 紫色：真空，含有 K₃-EDTA

二、檢體運送及特殊要求：

1. 需以冰袋保存 4℃ 以下運送者，如未用冰浴保存則以退件處理。
2. 需以冰袋保存 4℃ 以下運送者項目如下：ACTH、Renin、iPTH。
3. 運送時應將檢體放置於檢體專用傳送盒內運送。
4. 運送途中應確保試管蓋子無脫落之虞。

三、重複檢驗條件

1. 疑義檢體(如：與前次報告不符)
2. 報告值超過重大異常值通報標準(如：TSH>30 μ IU/ml、FT4>6 ng/dl、TG>500 ng/ml)
3. 與常理不合之報告值(如：TSH 值應與 T3、T4、FT4 值呈拮抗作用)
4. 重複檢驗後報告, 應在備註加上「rechecked」字樣